

APROVAÇÃO DE ARTE FINAL		
ÁREA	DATA	VISTO
Farmacêutico Responsável		
Produção		
Garantia da Qualidade		
Controle de Qualidade		
SAC		
EC		
Área Regulatória		
Marketing		

Skimatix[®]
Ultra

Ideal para
Uso Diário
Secagem
Ultra
Rápida

Gel de silicone para redução de cicatrizes

Uso externo

Uso adulto e pediátrico

O que é Skimatix[®] Ultra?

Skimatix[®] Ultra é um gel de silicone tópico transparente, com secagem ultra rápida, que ajuda a manter o equilíbrio da umidade da pele, enquanto auxilia na manutenção da superfície cicatrizada resultante de cirurgias, queimaduras, cicatrizes de acne, eritema pós laser e outros ferimentos.

Skimatix[®] Ultra é um gel leve e não-gorduroso que é facilmente aplicado em todas as áreas da pele, incluindo o rosto, articulações e dobras, onde forma uma camada invisível, deixando uma sensação sedosa.

Skimatix[®] Ultra demonstrou que não só aplaina, suaviza e alisa as cicatrizes, aliviando a coceira e o desconforto, como também diminui a descoloração associada.

Qual a composição de Skimatix[®] Ultra?

Skimatix[®] Ultra é composto de polímeros cíclicos de silicone e éster de vitamina C.

Quando utilizar Skimatix[®] Ultra?

Skimatix[®] Ultra deve ser utilizado para o tratamento e prevenção de queloides e cicatrizes hipertróficas (como aquelas resultantes de procedimentos cirúrgicos gerais, traumas e queimaduras), depois que a ferida foi curada e a superfície estiver intacta.

Como utilizar Skimatix[®] Ultra?

Lave e seque a área a ser tratada. Skimatix[®] Ultra apenas deve ser aplicado na pele limpa e seca. Aplique uma pequena quantidade de Skimatix[®] Ultra na cicatriz, formando uma fina camada. Para evitar manchas na roupa, aguarde a secagem completa do produto ou remova o excesso. Uma vez seco, Skimatix[®] Ultra pode ser coberto com produtos cosméticos.

A recomendação mínima de tratamento é de 2 meses, com aplicação de 2 vezes ao dia, ou como orientado pelo médico.

Skimatix[®] Ultra também pode ser utilizado em crianças.

Quando Skimatix[®] Ultra não deve ser utilizado?

Skimatix[®] Ultra não deve ser aplicado em feridas abertas, em mucosas ou muito perto dos olhos e sobre outro tratamento da pele sem a recomendação do médico.

Skimatix[®] Ultra pode causar algum efeito não desejado?

Raramente o gel pode causar vermelhidão, dor ou irritação na pele. Se houver qualquer preocupação por estes ou qualquer outro efeito não desejado, consulte seu médico.

Como armazenar Skimatix[®] Ultra?

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15°C e 30°C) e longe de fontes de calor.

Manter longe do alcance das crianças.

Não usar após o vencimento do prazo de validade impresso na embalagem.

Registro na ANVISA nº 80366840002

Resp. Téc.: Dra. Patrícia Viel - CRF-SP nº 35.923

Importado e distribuído por:

Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda.

Alameda Capovilla, 109

Indaiatuba - SP

CNPJ 61.186.136/0001-22 - Indústria Brasileira

Empresa do grupo

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. - Canadá

Produzido por:

Hanson Medical, Inc


Kingston, WA 98346 USA

VALEANT



VA1411/B
0580C

ESCALA PANTONE OU PROCESSO CMYK

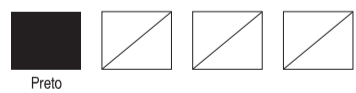

Preto

14/10/14 / SKIMATIX ULTRA - GEL - FOLHETO ORIGINAL

90 x 215,9 mm - (VA1411B_fo)

CÓD.: VA1411/B

(CM - 2014-0145V)